


VIKTIGA STEG

Förbereda infusionsset/fylla slang

För att undvika överdosering av insulin strax efter byte av infusionsset

Det är mycket viktigt att man följer nedanstående steg för att förhindra att vätska hamnar på infusionssetets membran under förberedelse/fyllning av slang:


- När reservoaren är fylld ska du se till att ampullen med insulin hålls upprätt när du lossar behållaren från det blå överföringsskyddet. På så sätt förhindrar du att insulin av misstag hamnar ovanpå reservoaren, vilket skulle kunna leda till att det överförs till infusionssetets membran.

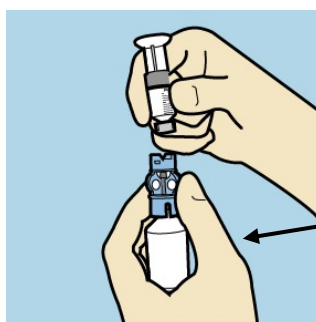

Ampull i
upprätt
position

Håll insulinampullen i upprätt position när du lossar reservoaren.

- Om någon vätska (t.ex. insulin, isopropylalkohol eller vatten) hamnar på reservoarens ovansida eller inuti slangkopplingen kan den blockera infusionssetets membran. Det kan leda till ett förhöjt tryck inuti pumpens reservoarkammare under slangpåfyllningen. Det kan eventuellt leda till överdosering av insulin strax efter infusionssetsbytet. Om vätska syns ovanpå reservoaren eller inuti slangkopplingen, börjar du om med en ny reservoar och nytt infusionsset.

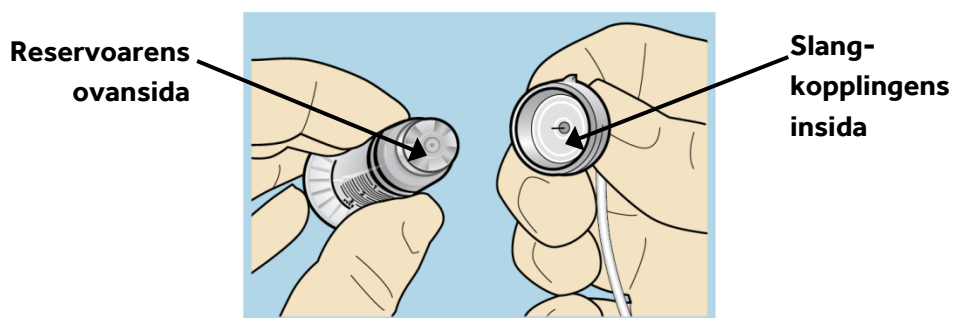

Kontrollera att dessa ställen är torra när de kopplas ihop.

Om du upptäcker något ovanligt efter slangpåfyllningen, exempelvis att det fortsätter droppa eller spruta insulin från infusionssetets kanyl, ska du inte använda det. Börja med en ny reservoar och ett nytt infusionsset.

Bästa praxis vid infusionssetsbyte:

- Byt inte infusionsset direkt innan du ska gå och lägga dig – du behöver kunna övervaka ditt blodsocker.
- Kontrollera blodsockret 1 timme efter du bytt infusionsset som en extra försiktighetsåtgärd utöver dina andra rutinkontroller.

Om du följer dessa råd kommer du att kunna upptäcka möjliga hypo- och hyperglykemier så att du kan vidta nödvändiga åtgärder.